



スマートレスト 取扱説明書

- ① スマートレストを取り付ける車椅子のハンドルグリップ間の幅を計ってください。
(D)のノブボルトを反時計回りに回し、緩めて、部品をスライドして位置決めをします。

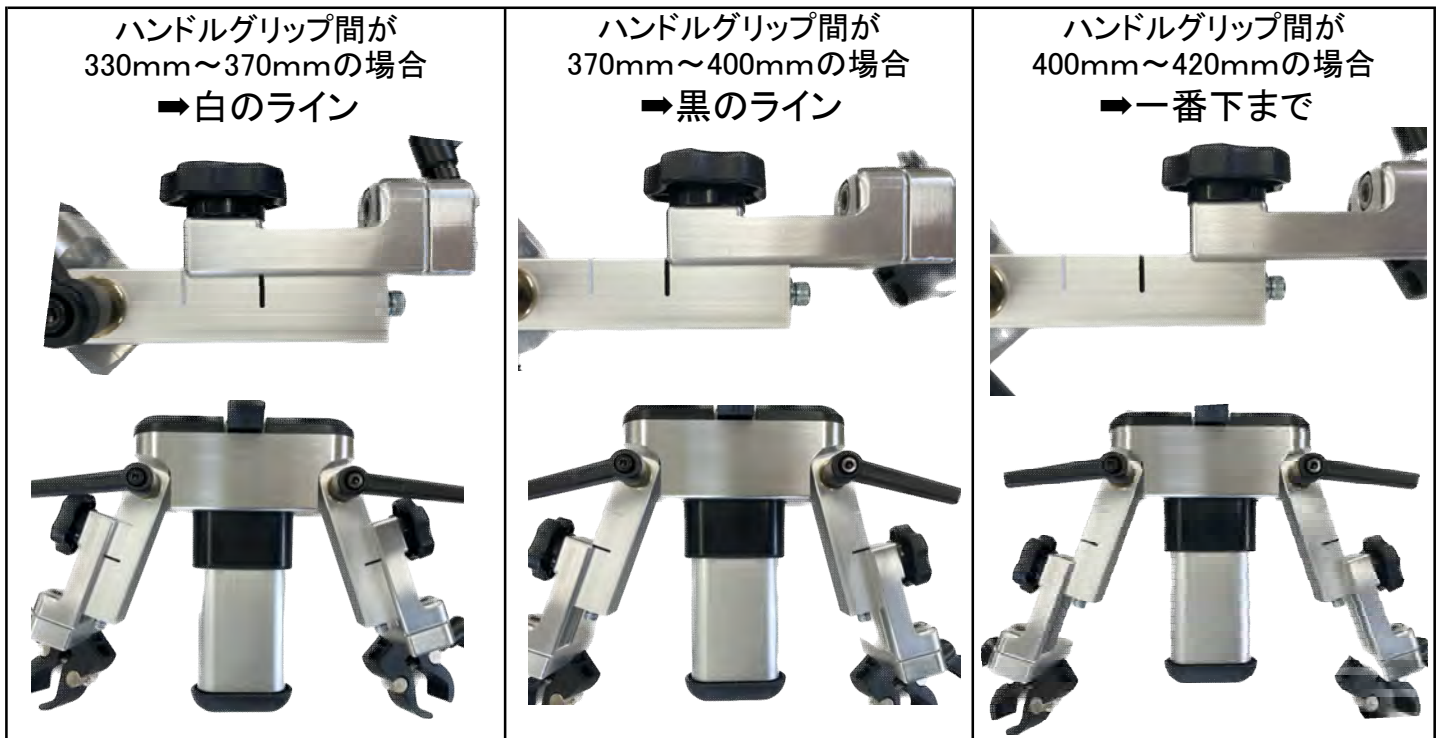

位置決めをしたら、(D)のノブボルトをしっかりと締めます。


- ② つぎに(C)のレバー左右両方とも反時計回りに回して緩めます。

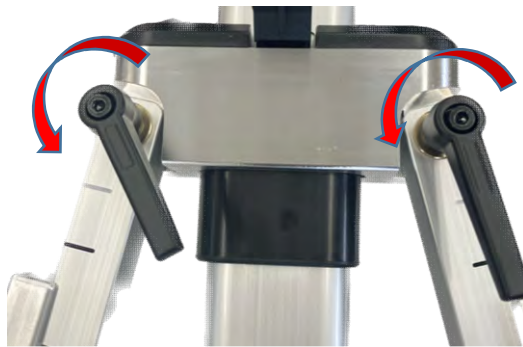

- ③ 片方ずつハンドルグリップ前のパイプに、できるだけ介助者様側に寄せて(E)のクランプレバーを取付けます。レバーをしっかり止まるまで時計回りに回して固定してください。



④ 反対側も同じようにしっかり固定します。

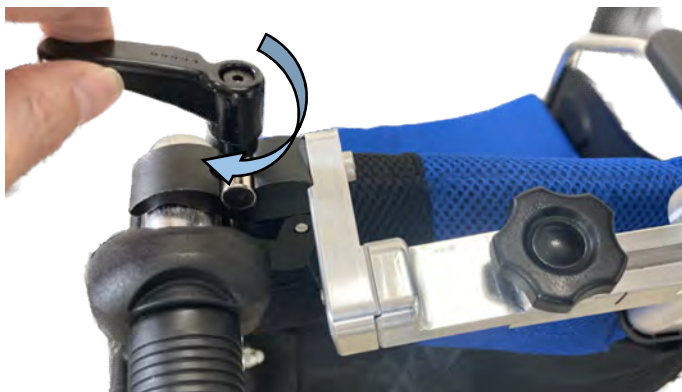

⑤ 両サイドの(E)のクランプレバーを固定したら、(C)の左右のレバーを時計回りにしっかり締めます。



※注意

(D)のノブボルトは回しすぎると外れます。少し緩めるだけでスライドできますので1周以上回さないようにしてください。外れても故障ではありませんので付け直してお使いください。

⑥ (A)を押して枕を可動させ、お好みの位置に合わせます。枕の高さは枕を引っ張りあげたり、(B)のレバーを押して、枕位置を下げたりして調節してください。



⑦ 最後に(C)、(E)のレバーを、引っ張り上げて、邪魔にならない方へ向きを調節し取付け完成です。



株式会社樋原製作所